

¡El alcoholímetro que puedes llevar contigo!



El BREATHIQ® es un analizador de alcohol, desechable, precalibrado, que permite conocer con un simple cambio de color, si la persona cuenta con un nivel de alcohol igual o mayor .08% BAC. Ideal para cuidar a tus amigos, familiares, colegas de trabajo, colaboradores, etc. No arriesgues tu vida ni dejes que arriesguen la suya.

Recomendado para uso personal, en empresas, escuelas, restaurantes y bares, transportistas, pilotos y sobrecargos, choferes, trabajadores y operadores de maquinaria, clubes e instalaciones deportivas, hospitales, barcos, aeropuertos, seguridad, operativos de vialidad, etc.



1 Espera 15 minutos después de la última bebida alcohólica o enjuaga la boca con 30ml de agua. Retira el analizador del llavero. Quita la bolsa de plástico para sacar el analizador.



2 Presiona firmemente el centro del analizador, hasta que la ampolleta se rompa. No la dobles o tuerzas. Utiliza el analizador de inmediato.




3 Inspira profundamente y sopla en el analizador por 10 segundos continuos. No inhales durante la prueba.



4 Deja el analizador en una superficie plana. Espera 2 minutos para conocer el resultado.



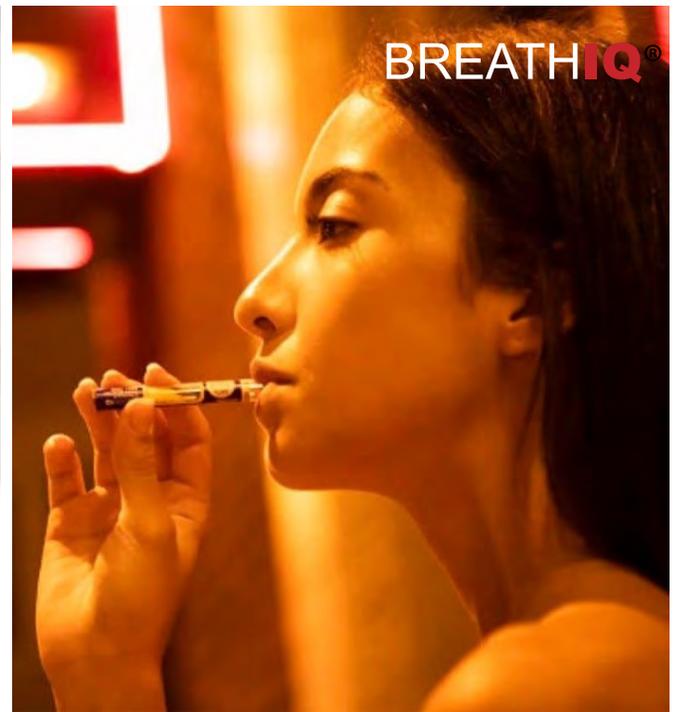

BREATHIQ®

Características



Rápido

Sin esperar - listo para usar



Confiable

99% de precisión
No requiere baterías



Durable

Resistente a golpes e impactos



Resistente al clima

Resistente al agua, temperatura y humedad



Compacto

Llavero integrado para cargarlo



Brilla en la oscuridad

Fácil de encontrar en la noche



El llavero del BREATHIQ® puede ser impreso con tu logotipo.

Referencias BAC

0.00% BAC	Único nivel seguro
0.02% BAC	Aliento alcohólico, disminución mínima de los sentidos
0.05% BAC	Disminución significativa de los sentidos. Se recomienda interrumpir cualquier actividad física de riesgo.
0.08% BAC	Internacionalmente se considera como ebriedad completa. Límite legal para conducir un vehículo en México.
0.10% BAC	Intoxicación legal en todos los estados de la República Mexicana.
3.15% BAC	A este nivel la mayoría de las personas pierden la conciencia.

Especificaciones técnicas

Código para ordenar:	PKB-01 (1 llavero con un analizador) PB-01* (1 analizador - refill)
Precisión:	99.9%
Nivel BAC**:	.08%
Certificación:	FDA Cleared
País de fabricación:	Estados Unidos de Norteamérica

Llavero

Tamaño aproximado:	10.8 (largo) x 1.91 (ancho) cms.
Material:	Polivinil
Característica especial:	Brilla en la oscuridad
Duración del brillo:	10 - 24 horas
Recarga del brillo:	Indefinida, con cualquier fuente de luz

**BAC = Blood Alcohol Content (Contenido de Alcohol en la Sangre)

*El refill del analizador se vende exclusivamente a quienes hayan comprado previamente el llavero



El llavero fotoluminiscente brilla de noche para facilitar su ubicación.

aviation consulting energy medical safety

exaris safety

Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. 45010
Tel. (33) 1454-9499 - ventas@exaris.mx

www.exaris.mx



/ExarisMx



@ExarisMx



exaris

ES-F-BREATHIQ Ver. 1.0 07/22